

Schoonmaakprotocol bevalbaden professionals

In verband met de hygiëne is het van belang het opblaasbare bevalbad en de benodigdheden goed te reinigen en regelmatig te vervangen.

Benodigdheden

- Emmer
- Water
- Schoonmaakmiddel
- Schoonmaakdoeken
- Droogdoeken

Let op!

Na gebruik dient het bevalbad direct leeggepompt te worden. De bevalhoes, waterslangen en pomp worden verwijderd uit het bevalbad. Daarna kan het bevalbad worden schoongemaakt. Bewaar het bevalbad in een gesloten (meegeleverde) tas in een schone, droge en koele ruimte.

Reinigen

Wij adviseren om handschoenen te dragen tijdens het reinigen van het bevalbad. Het bevalbad wordt uitsluitend met schoonmaakmiddel of met schoonmaakdoeken op alcoholbasis schoongemaakt. Wij adviseren om een schoonmaakmiddel op alcoholbasis te gebruiken waarbij de actieve bestanddelen na gebruik vervliegen.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen en organische oplosmiddelen (aceton e.d.). Dit geeft niet alleen een doordringende geur, maar er kunnen ook restanten in het bevalbad achterblijven.

Opblaasbaar bevalbad

Door de doorzichtige persoonlijke bevalhoes die na de bevalling weggegooid wordt, blijft het bevalbad grotendeels schoon. Toch dient het opgeblazen bevalbad na gebruik te worden gereinigd. Maak hiervoor gebruik van schoonmaakmiddel op alcoholbasis en schoonmaakdoeken. Ook is het essentieel dat het bevalbad na reiniging goed wordt droog gemaakt vanwege de mogelijkheid tot schimmelvorming.

Bevalhoezen

De persoonlijke hygiënische bevalhoes is voor eenmalig gebruik en kan direct na de bevalling worden weggegooid.

Slangen, pomp en kraankoppelingen

De aan- en afvoerslangen, pomp en kraankoppelingen kunnen na gebruik professioneel gereinigd worden. Wij adviseren hiervoor het volgende: maak de materialen schoon met een schoonmaakmiddel: lichte chlooroplossing (30 ml chloor op 5 liter water) of alcohol 70%. Het gebruik van handschoenen wordt aangeraden. De waterslangen en pomp kunnen met dit schoonmaakmiddel worden doorgespoeld en de kraankoppelingen worden afgewassen.

Vervangen

Het is belangrijk de benodigdheden van het bevalpakket uit hygiënisch oogpunt regelmatig te vervangen. Wij hanteren hiervoor de onderstaande richtlijnen:

Product

Opblaasbaar bevalbad
Kraankoppelingen
Aan- en afvoerslangen
Pomp

Vervangen na aantal keren gebruik

30 keer
20 keer
20 keer
40 keer